

小児喘息吸入補助スプレー

吸入速度が速いとアラート音になり、適切な吸入をサポート

本体(スプレー)



乳幼児/息止めが苦手な方
(5～10秒)

ライトタッチフェイスマスク

サイズ：S, M, L

対象年齢(目安)

S：0～18 か月

M：1～5 歳

L：5 歳以上



お問合せ・ご相談は お客様コールセンター


TEL:0120-48-4159 受付時間 7:00～22:00 (年中無休 365日対応)

2. クリーニング

本製品およびライトタッチフェイスマスク(オプション)は1週間に1度以上の洗浄を行うことを推奨いたします。洗浄および洗浄中には、次のことに注意してください。

1. 本製品のバルブ部分に無理に力を加えたり、外したりしないでください。
2. 本製品は滅菌や熱湯消毒は行わないでください。
3. 取扱説明書に従って洗浄してください。

3. チャンバー・マスクのお手入れ方法

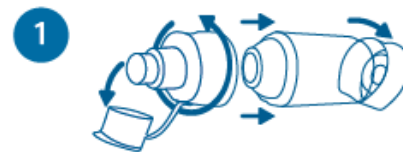


マウスピースキャップ、及びエンドキャップを引き抜き、マウスピースを回転させながら取り外します。



本製品は、液体中性洗剤を入れたぬるま湯の中で、1分間振り洗いした後、最低10分間浸け置きしてください。ライトタッチフェイスマスクは、液体中性洗剤を入れたぬるま湯の中で、2分間振り洗いするか、または10分間浸け置きしてください。



清潔な流水で部品をすすぎ、余分な水気を振り払い、すべての部品を完全に乾燥させてください。

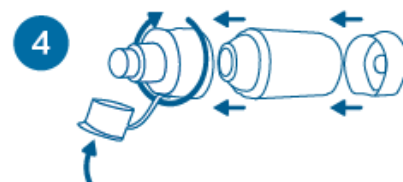

チャンバーを組み立て、清潔で乾燥した場所で保管してください。

1. 吸入手順 「ネブライザー」と「噴霧式定量吸入器＋スパーサー」で効果同等！＋気管支/肺への到達率を上げて、副作用（嘔声・カンジダ）を減らします！

いつでも
どこでも
旅行先でも
携帯性あり

中性洗剤で
洗える！

急性期は
気管支拡張薬
が基本！

経口内服
気管支拡張薬
は効果なし…
昔の慣習的
治療法…

急性/慢性期は
ステロイド薬
が基本！



マウスピースキャップをはずし、チャンバー内部に損傷、または異物がないことを確認してください。異物があった場合は取り除いてください。



MDI*キャニスターをエンドキャップにしっかりと挿入してください。

*MDI: Metered Dose Inhaler (噴霧式定量吸入器)



ライトタッチフェイスマスク（オプション）を使用する場合は、マスクをマウスピースに差し込み、軽くひねってしっかりと接続してください。



MDIが挿入されたチャンバーを、使用するMDIの取扱説明書に従って振ってください。（薬剤によっては振る必要がないものもございます。）



マウスピースを唇で密閉するようにくわえ、息を吐いてください。MDIを1回だけ押して、ゆっくりと深く息を吸い込み、5～10秒息止めをしましょう！
息止めが難しい場合には、マスク装着時と同様にマスク密着のまま5～6回呼吸をさせます。



吸入流速アラート音が鳴った場合、息を吸うスピードをおとしてください。



ライトタッチフェイスマスクをご使用の際は、口と鼻を覆うようにマスクを顔にあてて密封させます。次にチャンバー内に1回噴霧し、5～6回の呼吸の間、密着させてください。



呼気時に呼気弁が開くので、呼吸回数のカウントに便利です。呼気弁の紛失にご注意ください。

密着が甘いと効果減にて
ぴったり密着が必須！